

Anwendungsgebiet nach MPG

Vorgetränkte Tücher für die Wischdesinfektion von alkoholsensiblen Oberflächen, insbesondere für Polster von Behandlungsstühlen.

Anwendungsgebiet nach Biozidverordnung

Vorgetränkte Tücher für die Wischdesinfektion alkoholsensibler Flächen. Besonders weiches, fusselfreies und reißfestes Vlies. 100% PES. Hohe Aufnahmefähigkeit der Tränkflüssigkeit. Stärke: 50g/qm. Großformatiges Tuch: 28 x 30 cm. Ohne Alkohol und ohne Parfümstoffe.

Anwendung

Zur Desinfektion die Desinfektionstücher einzeln entnehmen, die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände vollflächig abreiben und das Präparat einwirken lassen. Nach der vorgegebenen Einwirkzeit mit einem sauberen Tuch nachwischen.



Eigenschaften

DentaProtect pflegt und schützt stark beanspruchte Kunstlederpolster. Die Oberfläche wird versiegelt. Das Mittel ist ein Mikrobinder zum Schutz gegen Abriebschäden, Anschmutzungen und Verfärbungen durch Bekleidung.

Anwendung

Bringen Sie die Versiegelung abends nach dem gründlichen Reinigen mit einem weichen Schwamm oder einer Bürste auf das trockene Polster auf. Sie benötigen 1-2 Tücher für einen kompletten Polstersatz Ihrer Behandlungsliege. Nach der Änwendung Dose sofort wieder verschließen!

DentaClean Reiniger

für Kunstleder, Kunststoff- und Glattlederoberflächen



Wir bestellen hiermit:

Eigenschaften

DentaClean reinigt schonend und problemlos verschmutzte Kunstleder- und Kunststoffober-

Zuerst an verdeckter Stelle testen. Wir empfehlen, täglich nach der letzten Behandlung die Stuhlpolster zu reinigen. Dies ist besonders bei hellen Farben notwendig, sichtbare Verschmutzungen müssen sofort entfernt werden. DentaClean mit dem mitgelieferten Schwamm kreisförmig auf die zu reinigenden Flächen auftragen. Anschließend mit einem weichen, auftragen. Anschliebend mit einem weichen, saugfähigen Tuch Feuchtigkeit und Schmutz aufnehmen. Zweimal in der Woche sollte anstatt des Schwamms die Reinigungsbürste zur gründlichen Reinigung verwendet werden. Anschließend mit DentaProtect versiegeln. Polster, welche regelmäßig und korrekt mit DentaProtect behandelt werden, lassen sich

Stück

Art.-Nr.

PowerClean Extra starker Reiniger für Kunstleder- und Kunststoffoberflächen

Eigenschaften

PowerClean reinigt starke Verschmutzungen auf Kunstlederoberflächen, die sich mit DentaClean nicht lösen lassen. Anschmutzungen und Verunreinigungen, die sich mit PowerClean nicht lösen lassen, können nicht gereinigt werden, ohne dass die Oberfläche

Verfärbungen, aufgrund von Migration nicht fixierter Farbstoffe in der Bekleidung, werden meist nicht gelöst.

Anwendung

Zuerst an verdeckter Stelle testen. Danach die verschmutzte Stelle mit einem fusselfreien Tuch einreiben, kurz einwirken lassen und mit einem trockenen Tuch abwischen. Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen. PowerClean ersetzt nicht den Reiniger für den täglichen Bedarf (DentaClean), es sollte nur bei besonders



starken Verschmutzungen angewandt werden. Produktreste nach der Reinigung entfernen. leichter reinigen!

Preis €

Desinfektion	 proPad Spenderbox inkl. XL Desinfektionstücher 100 Tücher proPad XL Refill Desinfektionstücher 300 Stück 3 x 100 Tücher 	St.	PP100 PP300	24,90/St. 49,90/St.
	Pflegeset 1 x DentaClean 200ml Sprühschaum-Reiniger (Art. DC200) 1 x DentaProtect Tuchspenderdose (Art. DP100) 1 x Reinigungsbürste , 3 x Reinigungsschwamm	St.	PSET	29,90/St.
Reinigung und Pflege	PowerClean 150ml	St.	PCL	39,99/St.
	DentaClean 1000ml Nachfüllflasche für Sprühschaum-Reiniger	St.	DC1000	24,90/St.
	DentaClean 200ml Sprühschaum-Reiniger inkl. 2 x Reinigungsschwämme	St.	DC200	14,90/St.
	DentaProtect Tuchspenderdose 100 Tücher im Einweg-Verschlussbeutel	St.	DP100	16,90/St.
	DentaProtect Tuchspenderset 6 Tuchspenderdosen je 100 Tücher im Einweg-Verschlussbeute	St.	DP600	66,60/St.
	Reinigungsbürstenset, 4 Stück	St.	RB4	9,95/St.
Re	Reinigungsschwammset, 8 Stück	St.	RS8	7,50/St.

Preise zzgl. Mehrwertsteuer + Versandkosten

Stand: März 2017

Absender:

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Ausgabe März 2017



Je eher, desto besser...



Zum sachgemäßen Umgang mit Verschmutzung und Verfärbung im Kunstleder von Behandlungsliegen, nutzen Sie unser Pflegeprogramm. Grundsätzlich gilt: Je eher eine Verschmutzung oder eine Verfärbung erkannt wird, desto besser ist die Chance, diese zu beseitigen.







Antwortkarte

DKL GmbH

An der Ziegelei 4 D-37124 Rosdorf Bitte freimachen falls Marke zur Hand

oder Fax