

Peroxy Ag+

**Desinfektionsmittel für die Wasserleitungen von Behandlungseinheiten.
Produkt für den professionellen Gebrauch**

Gebrauchsanleitung:

Desinfektion: Unter Beachtung der Gebrauchsanleitungen der Behandlungseinheit das Produkt pur (3% Wasserstoffperoxyd) in den spezifischen Behälter für das Desinfektionsmittel an der Behandlungseinheit geben. Keimhemmender Schutz der unabhängigen Wasserversorgung: 20 ml Produkt pro L Wasser (destilliert) im Versorgungsbehälter verdünnen, um eine 600 ppm Wasserstoffperoxydlösung zu erhalten.

Zusammensetzung:

3% Wasserstoffperoxyd, 0,001% Silberionen (Ag+), Stabilisierungsmittel, Wasser nach Bedarf. Wirkung in den Wasserleitungen der Behandlungseinheit: Das 3%ige Wasserstoffperoxyd hat sich als mykobakterizid, bakterizid und fungizid bei 10 Minuten Kontakt erwiesen. Die 600 ppm Lösung hat sich als wirksam bei der Hemmung des mikrobischen Wachstums im Inneren der Leitungen erwiesen.

Hinweise:

Das Produkt unter Beachtung der Gebrauchsanleitungen der Behandlungseinheit verwenden. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.